

Kneemo

knee movement organizer ニーモ

Kneemo は脳卒中後の片麻痺の方の歩行をサポートします。

ゴムチューブを動力源として、膝関節の屈曲、もしくは伸展をサポートする歩行補助機器です。

装着することで、身体能力を使い、運動能力を向上させ、早期離床や歩行の自立を目的としてリハビリをサポートします。

動力源のゴムチューブは、セラピストが使用者の身体能力に合わせて最適な強さを選んで取付けます。

チューブは取付けフックに掛けるだけで簡単に着脱可能です。



Kneemo 特徴

ゴムチューブを動力源とした膝関節の屈曲、もしくは伸展をサポートする歩行補助機器です。セラピストが使用者の身体能力に合わせて最適なチューブの強さを選択します。最適に使用することで、身体能力を使い、運動能力を向上させ、早期離床や歩行の自立を目的としてリハビリをサポートします。



屈曲サポート

- フットクリアランスの増加
- イニシャルコンタクト～ミッドスタンスにおける膝関節伸展運動の防止
- イニシャルスイングにおける下肢の振出しの促進



伸展サポート

- イニシャルコンタクトにおける膝関節屈曲の軽減
- ミッドスタンスにおける膝折れの軽減
- 長下肢装具から短下肢装具への移行時に短下肢装具と併用



屈曲・伸展サポート

- 膝関節の支持性にプラスして安定性の向上
- 自立歩行可能な方において、歩行速度、距離の増加
- 長下肢装具から短下肢装具への移行時に短下肢装具と併用（伸展サポートのみより振出しやすい）

現在、医師または医療従事者の方で本製品サンプルデモをご希望される方は下記連絡先までお問合せ下さい。

サポーター本体 (繊維)	ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、合成ゴム
サポーター本体 (繊維以外)	人工皮革、ポリプロピレン、ポリエステル、ナイロン、黄銅、アルミニウム、ガラス入強化ナイロン
チューブ	天然ゴム、エポキシ系樹脂
Kneeバンド	ナイロン、ポリエステル



サイズ	適応範囲
S	34cm～38cm
M	38cm～42cm
L	42cm～46cm
LL	46cm～50cm

※膝蓋骨中心より10cm上の大腿周径

価格 基本セット価格：38,500 円 (税込)

セット内容：Kneemo 本体、チューブ 2 組、Knee バンド 1 型

※詳細は松本義肢製作所までお問い合わせください。

【販売代理店】

- ・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- ・本製品は目的以外の使用は絶対にしないでください。
- ・本製品は医療機器ではなく、効果効能を保證するものではありません。

【製造・販売元】

株式会社松本義肢製作所

〒485-8555 愛知県小牧市大字林 210-3

Tel:0568-47-0150 Fax:0568-47-0151

Mail:kikaku@pomgs.co.jp

ソフトフィット フェイスガード。©

SOFT FIT
FACE GUARD



相手にも“やさしい”クッション仕上げ

“しなやか”でぴったりフィット

全体をクッションで覆っており、接触した相手も傷つけません。
柔軟性のある心材を使用し、顔に沿いやすくフィットします。
コーティングにより汚れを簡単にふき取れ、お手入れが簡単です。



希望小売価格：19,800円（税込）

【サイズ】

フリーサイズ（参考値：頭囲周径54cm～）

【素材】

本体：ポリエチレン・塩化ビニル

ベルト：ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン

【重量】

65g（本体・ベルト含む）

【内容】

フェイスガード本体・上下ベルト

【使用上の注意】

- 試合によって使用できない場合がありますので、事前に競技団体へお問合せください。
- 装着部に傷、痛み、しびれ、腫れ、湿疹、かぶれなどの異常が生じた場合はただちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 本製品は患部の保護を保証するものではありません。
- 汚れを落とす場合は水で湿らせた布やアルコールで表面を拭いてください。

株式会社 **松本義肢製作所**
しあわせをかたちにする人と技術の会社です

本社 485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
名古屋営業所 〒461-0013 名古屋市東区飯田町5-1
静岡営業所 〒422-8056 静岡市駿河区津島町1番11号
長野営業所 〒390-0852 松本市大字島立330番1号

tel. (0568) 47-1701 (代)
tel. (052) 939-3577
tel. (054) 288-1115
tel. (0263) 48-2061

fax (0568) 47-1702
fax (052) 939-3578
fax (054) 288-1128
fax (0263) 48-2062

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp



快適な装着感と通気性を両立した軽量タイプ

通気性を重視したメッシュ素材を採用。

取り付けられた半硬質メッシュがズレ上がりを抑えます。運動中も蒸れにくく快適です。

ベルト全体に伸びない素材を採用し、より確実に腹圧を上昇させ、腰部をしっかり固定します。

幅広すぎないサイズで動きやすさと固定力を両立したサイズになっています。軽量タイプでスポーツにも適しています。

腹圧上昇効果をさらに高める補助ベルトで二重に腰を引き締め、腰部の安定性を高めます。



サイズの選び方

	S	M	L	XL	2XL	3XL
適用範囲(腰周囲) cm	63~72	72~81	81~89	89~97	97~105	105~113
製品高さ cm	18					

●へそを基準にウエストの周りを計測してください

素材

ポリエステル・ポリエチレン
ポリアセタール・ナイロン・ゴム

希望小売価格：2,750円(税込)

【使用上の注意】

- アレルギー体質の方、装着部に傷、腫れ、湿疹などの異常のある場合、妊娠中または妊娠していると思われる場合は使用しないでください
- 使用中に痛みや痺れ、かぶれ、フィッティングの不具合等の支障が生じたときは速やかに使用を中止し、医師に相談のうえ指示に従ってください。
- 本品は、必ず肌着や衣類の上から装着し、肌に直接当てないでください。

株式会社松本義肢製作所
しあわせをかたちにする人と技術の会社です

本社 〒485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
名古屋営業所 〒461-0013 名古屋市東区飯田町51
静岡営業所 〒422-8056 静岡市駿河区津島町1番11号
長野営業所 〒390-0852 松本市大字島立330番1号

tel. (0568) 47-1701(代) fax (0568) 47-1702
tel. (052) 939-3577 fax (052) 939-3578
tel. (054) 288-1115 fax (054) 288-1128
tel. (0263) 48-2061 fax (0263) 48-2062

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp

ウエストサポートベルトの **5** つの POINT !

1
point

快適な装着感を実現！

ズレにくい半硬質のメッシュ素材を採用。
軽くて通気性に優れているため、汗やムレを軽減し快適に装着できます。



2
point

腰部をしっかり固定！

メインベルトに非伸縮生地を使用することで、より確実に腹圧を上昇させ、腰部をしっかり固定します。



3
point

2本のプラスチックステーが腰椎を優しく支えます！

プラスチックステーを腰椎に沿って左右に各1本ずつ配置。
腰椎を優しく支えて腰を安定させます。



4
point

補助ベルトでしっかり固定！

補助ベルトによって二重に腰を引き締め、安定性を高めます。
また、装着したまま締め付け具合(圧力)を調整できるので、しっかりフィットし動きやすい！



5
point

軽くてスポーツにも最適！

高さ18cmとスリムな構造なので動きを妨げず、腰をしっかりサポートします。
また、Mサイズで164gと軽量でスポーツにも最適です。



	S	M	L	XL	2XL	3XL
重さ g	158	164	172	184	190	202

ポアブーツ


冷えやすい足元を

優しく保護・保温します

どんなコーディネートにも

合わせやすいブラック!

肌寒い春秋の冷え対策としても

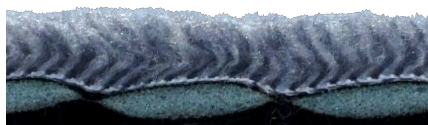

従来のポアブーツより保温力UP◎

ウレタンフォームとポアの2層構造でより暖かく優しく包み込み足を保護します。

従来のポアブーツよりゆったりしたサイズで多くの空気をため込み、ふわふわのポアが暖かい空気を逃さず保温効果を保ちます。

豊富なサイズ展開でお子様から大人までご使用いただけます。

サイズ	SS	S	M	L	LL
足長	12~14cm	15~17cm	18~20cm	21~23cm	24~26cm
高さ	22cm	24cm	31cm	34cm	37cm

【素材】

ポリエステル・アクリル
指定外繊維（アクリレート）
ウレタンフォーム

・記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がございますのでご了承下さい。
・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
・本製品は、目的以外の使用は絶対にしないで下さい。

希望小売価格：¥11,550(税込)

株式会社松本義肢製作所
しあわせをかたちにする人と技術の会社です

本社 千485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
名古屋営業所 千461-0013 名古屋市東区飯田町51
静岡営業所 千422-8056 静岡市駿河区津島町1番11号
長野営業所 千390-0852 松本市大字島立330番1号

tel. (0568) 47-1701(代)
tel. (052) 939-3577
tel. (054) 288-1115
tel. (0263) 48-2061

fax (0568) 47-1702
fax (052) 939-3578
fax (054) 288-1128
fax (0263) 48-2062

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp

\ BOA BOOTS /

POINT 1



足先までふわふわ

内側全体をふわふわのボアで覆っているので暖かく、優しく足を包み込みます。


ふわふわのボアが暖かい空気を逃さず保温効果を保ちます。

折り返しを伸ばして履くこともできます。

足の保護や冷え対策に最適です！

\ BOA BOOTS /

POINT 2

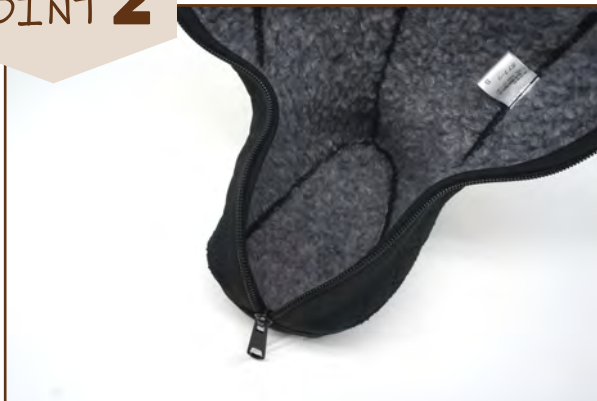

しっかり開いて足が入れやすい

ファスナーが足先まで開くので装着がらくちん！

大きめの持ち手でファスナーが開閉しやすい仕様になっています。

\ BOA BOOTS /

POINT 3



装具の上からも履ける

ゆったりサイズなので、装具の上からの装着も可能です。

サイズ	SS	S	M	L	LL
トップ周径	25.5cm	29cm	33cm	38cm	40cm

\ BOA BOOTS /

POINT 4



やわらかいソール

滑りにくいソフトなソールでルームシューズとして最適です。

らくちんモック®

軽量 携帯型ナイロンメッシュ担架

入浴
介助
にも

非常・緊急時
の担架としても
活躍しています



・折りたたんで携帯・収納にも便利です

・ナイロン素材で手入れがとても簡単

・入浴時の介護など水に濡れる場面
にも清潔にお使いいただけます



・手に優しいグリップスタイルで
安全に移動できます

3
サイズ

S 120cm x 55cm (適応身長 ~ 160cm)

M 125cm x 55cm (適応身長 160 ~ 170cm)

L 135cm x 60cm (適応身長 170 ~ 185cm)

※適応身長は目安です。

体重 100kg まで (各サイズとも) 素材 ナイロンメッシュ



シチュエーションに合わせて
横持ちも可能です

・記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承下さい。
・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
・本製品は、目的以外の使用は絶対にしないで下さい。

希望小売価格：¥15,400(税込)

オーダーカラー(赤色・黄色・黒色)は¥4,400増しになります。

株式会社松本義肢製作所

しあわせをかたちにする人と技術の会社です

本社
名古屋営業所
静岡営業所
長野営業所

〒485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
〒461-0013 名古屋市東区飯田町51
〒422-8056 静岡市駿河区津島町1番11
〒390-0852 松本市大字島立330番1号

tel. (0568) 47-1701(代)
tel. (052) 939-3577
tel. (054) 288-1115
tel. (0263) 48-2061

fax (0568) 47-1702
fax (052) 939-3578
fax (054) 288-1128
fax (0263) 48-2062

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp

らくちんだっこ[®]

軽量 携帯型ナイロンメッシュ担架

1人介助

非常・緊急時の担架としても活躍しています



- ・折りたたんで携帯・収納にも便利です
- ・ナイロン素材で手入れがとても簡単
- ・入浴時の介護など水に濡れる場面にも清潔にお使いいただけます
- ・クロスベルトにより1人での介護時に安心した移動作業が可能です



2
サイズ

M

65cm x 46cm (適応身長 ~ 110cm)

L

75cm x 80cm (適応身長 110 ~ 170cm)

体重 100kg まで (各サイズとも) 素材 ナイロンメッシュ



・記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承下さい。
・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
・本製品は、目的以外の使用は絶対しないで下さい。

希望小売価格: ¥12,760 (税込)
オーダーカラー (赤色・黄色・黒色) は ¥3,300 増しになります。

株式会社松本義肢製作所

しあわせをかたちにする人と技術の会社です

本社 名古屋営業所 静岡営業所 長野営業所
〒485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
〒461-0013 名古屋市東区飯田町5-1
〒422-8056 静岡市駿河区津島町1番11
〒390-0852 松本市大字島立330番1

tel. (0568) 47-1701 (代)
tel. (052) 939-3577
tel. (054) 288-1115
tel. (0263) 48-2061

fax (0568) 47-1702
fax (052) 939-3578
fax (054) 288-1128
fax (0263) 48-2062

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp

らくちんだっこ

ご利用ガイド



介助者側から見てまずこの状態にします
補強テープのある面を裏にします。



要介助者を横向きに乗せタスキをクロスさせ
バックルにつけます。



クロスさせた所から介助者の頭をくぐらせます
両腕をタスキのように通します。



要介助者との距離が開きすぎないように
タスキを調節します。



タスキの先端のマジックテープをとめます。



手前の取っ手に腕を通し、奥の取っ手をつかみ
要介助者の安定を確認してゆっくり持ち上げます。



腕の力だけでなく、体全体で安定に支えるので
一人でも安心介助が可能です。

肩への
負担を
軽減します

オプション「肩パッド」



- ・内側は3Dメッシュ素材を使用
 - ・抗菌仕様で水に濡れても大丈夫
- 2個セット(黒色)
¥1,760円(税込)

new
新商品

はいたらおどろき！



PAT. No.5307998

するとさん[®]

手を使わず脱ぎ履きしやすい みんなにやさしいサンダルです



足まで手が届かず
靴をしっかりと履けない時に

入院時の
履き物としても



リウマチ等で手が不自由な方も靴をしっかりと履けずに歩いていることがあり転倒の原因となります。



スリッパよりも安定感があり転倒の心配が少なくなります。さらにパタパタ音を出さず静かに歩くことができます。

・記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合があります。
・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
・本製品は、目的以外の使用は絶対にしないで下さい。

希望小売価格：¥5,500（税込）

株式会社 **松本義肢製作所**
しあわせをかたちにする人と技術の会社です

本社 〒485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
名古屋営業所 〒461-0013 名古屋市東区飯田町5-1
静岡営業所 〒422-8056 静岡市駿河区津島町1番11号
長野営業所 〒390-0852 松本市大字島内立330番1号

tel. (0568) 47-1701 (代)
tel. (052) 939-3577
tel. (054) 288-1115
tel. (0263) 48-2061

fax (0568) 47-1702
fax (052) 939-3578
fax (054) 288-1128
fax (0263) 48-2062

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp

超簡単な! するっとさんの履き方と脱ぎ方

履く時



足先から入ると滑るように履き込めます。

脱ぐ時



足を少し前へずらし、もう一方の足でおさえながら踵を上げます。

普通じゃないよ! するっとさんのすごいところ



踵に特殊な樹脂が入っているため、踏んで履いても元の位置に戻ります。



踵を保持して安定感抜群。転びにくく、靴よりも履きやすい!



甲バンドは調整できます。しっかりフィットするのに履きやすい!

こんな使い方も!

施設スタッフの
訓練・介助時に



オフィスでの足元を
安全で快適に

近所への
おでかけに



妊婦さんや
乳児の抱っこ時に

～ カラー ～
茶 / 黒

～ サイズ ～

SS サイズ (21.0 ~ 22.5 cm)
S サイズ (22.5 ~ 24.0 cm)
M サイズ (24.0 ~ 25.5 cm)

L サイズ (25.5 ~ 27.5 cm)
※黒のみ
LL サイズ (27.5 ~ 29.0 cm)



緊急避難用に
素早くしっかり履ける履き物として

ゴックん

らくちゃん



きくなん式・摂食嚥下用安心まくら

食事時などに頸部が伸展している姿勢では咽頭と気道が直線になり、気道が開いて誤嚥しやすくなります。

この枕の使用により、誰でも簡単に短時間で安全な頸部前屈姿勢を形成する角度を設定し誤嚥を予防します。

食事・摂食嚥下訓練・口腔ケア・各検査時などに活用できます。

嚥下
障がいにお困りでは
ありませんか？

通常
サイズ
セット



[ゴックん 枕本体]
大きさ：W (260) * L (260)
高さ：130mm
重さ：750g




寝床の角度が変化した場合の枕本体へ脱着可能な、角度調節用クッション

[角度調節用クッション]
角度：30°

セット希望小売価格：¥10,120 (税込)


S
サイズ
セット

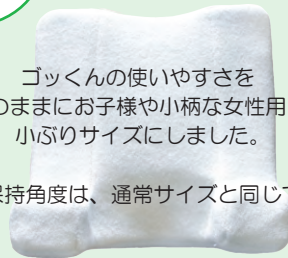

ゴックんの使いやすさをそのままにお子様や小柄な女性用に小ぶりサイズにしました。

姿勢保持角度は、通常サイズと同じです。

[ゴックん・Sサイズ 枕本体]
大きさ：W (225) * L (228)
高さ：110mm
重さ：600g

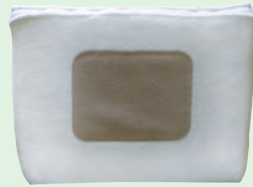

[角度調節用クッション]
角度：30°

セット希望小売価格：¥10,120 (税込)

ゴックん
オプション
さらに便利に



健側を患側より下側に位置させる場合の、枕本体や角度調節用クッションと寝床との間に挿入する左右角度調節用クッション

[左右角度調節用クッション]
角度：15°

希望小売価格：¥2,750 (税込)

[交換用カバー]
枕本体用
希望小売価格：¥4,180 (税込)

角度調節用クッション用
希望小売価格：¥1,980 (税込)

左右角度調節用クッション用
希望小売価格：¥1,760 (税込)

・記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承下さい。
・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
・本製品は、目的以外の使用は絶対にしないで下さい。

考案者：
大塚裕一先生 (熊本保健科学大学)・宮本恵美先生 (熊本保健科学大学)

きくなん式・摂食嚥下用安心まくら：取扱ガイド

誤嚥を予防するための安全な頸部前屈姿勢のセッティングを考えた場合、多くの介護者が以下のような問題をあげています。

- 1) 安全な頸部前屈姿勢が枕等の形や構造の問題で作れない。
- 2) 枕を重ねたり、枕とタオル等の組み合わせで調整したり等、労力と時間を要する。
- 3) 頸部前屈姿勢が時間経過とともに崩れる。
- 4) 頸部前屈の設定角度が介助者によって異なる。

今回、以上のような問題を解決するために、きくなん式摂食嚥下用安心まくら「らくちんゴックん」を提供いたします。



通常の枕では十分な前屈姿勢が作れず、
気道が開いている



枕やタオルでの調整は不安定で前屈姿勢
が時間とともに崩れる



安定した頸部前屈姿勢で、
誤嚥予防に効果的です

使用方法：

- 1) 臥位 30 度から 45 度までは枕本体と角度調節用クッションを併せて使用します。
- 2) 臥位 45 度から 60 度までは枕本体のみを使用します。
- 3) 麻痺があり左右どちらかに傾ける必要がある場合は、別売りの左右角度調節用クッションを枕本体から角度調節用クッションに敷きこんで使用します。

下顎角を固定し、頭部の上下左右の
すれを防止する、またくぼみにより、
頭部の左右のすれの防止をより強化します

枕本体

滑り止め材により安全な角度が
変化することを防ぎます

角度調節用クッション
セッティング例

角度調節用クッションと
左右角度調節用クッション
併用セッティング例

角度調節用クッション

左右角度調節用クッション

商品の特徴：

- 1) 摂食嚥下障害の知識があまりない方でも寝床のリクライニング角度に応じた安全な頸部前屈姿勢を簡単に短時間でつくれ、かつその姿勢が崩れません。
- 2) 寝床のリクライニング角度を変化させても角度調節用クッションにより安全な頸部前屈姿勢を簡単につくれ、かつその姿勢が崩れません。
- 3) 麻痺等で患側より、健側を下側に位置させる必要がある場合、左右角度調節用クッションでその姿勢を簡単につくれ、かつその姿勢が崩れません。

！ 実用新案登録
第：3123323号

株式会社松本義肢製作所
しあわせをかたちにする人と技術の会社です

本 社
名古屋営業所
静岡営業所
長野営業所

〒485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
〒461-0013 名古屋市東区飯田町51
〒422-8056 静岡市駿河区津島町1番11
〒390-0852 松本市大字島立330番1号

tel. (0568) 47-1701(代)
tel. (052) 939-3577
tel. (054) 288-1115
tel. (0263) 48-2061

fax (0568) 47-1702
fax (052) 939-3578
fax (054) 288-1128
fax (0263) 48-2062

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp

開発者 大塚裕一先生(熊本保健科学大学)
宮本恵美先生(熊本保健科学大学)



熊本保健科学大学式嚥下障がい者用コップ

誤嚥無門[®]

ゴエモン

いきおいよく傾けても定量しか出ない構造になっているので多量の水分が一度に口に入ることなく誤嚥しにくくなります。

顎を上げずに飲むことができ
誤嚥しにくくなります

ストローは取り外しができ
簡単に洗浄できます

内容量が一目でわかる
目盛り付きです

※トロミを使用する場合は

日本摂食嚥下リハビリテーション学会分類2013
(とろみ)段階1薄いとろみ程度のものをご使用ください



ストロー用容器

コップ本体を傾けることにより、ストロー用容器の入口がコップ内の飲料の表面以上となりどれだけ傾けても定量(7cc~8cc)以上は入らず、飲む量を制限できます。

【対象者】病院・施設・自宅療養者・高齢者



飲む際は、
ストローの付け根が手前になるように、コップを持ち
ご使用下さい。

【材質】

コップ、ストロー容器：ポリカーボネイト(PC)
フタ：ポリプロピレン(PP)
ストロー本体：シリコンゴム
容量：200ml
重量：85g

希望小売価格：¥1,980円(税込)

・記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承下さい。
・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
・本製品は、目的以外の使用は絶対にして下さい。

株式会社松本義肢製作所

しあわせをかたちにする人と技術の会社です

本社
名古屋営業所
静岡営業所
長野営業所

〒485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
〒461-0013 名古屋市東区飯田町51
〒422-8047 静岡市駿河区津島町1番地11号
〒390-0852 松本市大字島立330番1号

tel. (0568) 47-1701(代)
tel. (052) 939-3577
tel. (054) 288-1115
tel. (0263) 48-2061

fax (0568) 47-1702
fax (052) 939-3578
fax (054) 288-1128
fax (0263) 48-2062

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp



mother・barr[®]

マザー・バー

頭部・体幹の姿勢補助用
フレキシブル・サポート

安心感

車椅子に座った際
身体が横へ傾いてしまう場合に
身体を包むように
クッションで囲むことで
座位姿勢が安定し
負担を軽減させます

マザー・バーは曲げたりひねったりして自由に形状を変えられるクッションです。
姿勢が崩れやすい方に、肌触りの良いクッションで支えをつくり姿勢保持のサポートをします。



高齢者介護での体幹の支えや障がい児のバランス感覚教育など
様々なシーンでご利用いただけます。

株式会社 **松本義肢製作所**
しあわせをかたちにする人と技術の会社です

・本 社
・名古屋営業所
・静岡営業所
・長野営業所

・〒485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
・〒461-0013 名古屋市東区飯田町51
・〒422-8056 静岡市駿河区津島町1番11号
・〒390-0851 松本市大字島内4621-1

・tel. (0568) 47-1701 (代) fax (0568) 47-1702
・tel. (052) 939-3577 fax (052) 939-3578
・tel. (054) 288-1115 fax (054) 288-1128
・tel. (0263) 48-2061 fax (0263) 48-2062

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp

mother・barr.®



ニットカバー
生地
カラー：ブルーのみ

タオルカバー
生地

タオル生地 カラーバリエーション

ブルー レッド ピンク

～サイズ規格～

Sサイズ： 8 x 5 x 50cm
Mサイズ： 13 x 6 x 75cm
Lサイズ： 13 x 6 x 150cm
(タテ x ヨコ x 全長)
丸 型： Ø7 x 100 cm
(径 x 全長)
材質：ウレタンフォーム

OPTION

オプション：フリーマジック mother・barr

フリーマジックを使用することで、マザー・バー同士の連結や他の場所との固定が可能になり、使用用途の幅も大きく広がります。
フリーマジック・ブラック (全長70cm x 幅5cm)
一本あたり：¥450 (税別)

TAIS コード：01172-000003

商品名	ニット生地カバー (ブルーのみ)		タオル生地カバー (ブルー・レッド・ピンク・イエロー)	
	本体	替えカバー	本体	替えカバー
マザー・バー S	¥4,180	¥1,045	¥4,730	¥2,310
マザー・バー M	¥5,610	¥1,540	¥6,710	¥2,596
マザー・バー L	¥11,000	¥1,870	¥12,650	¥4,334
マザー・バー S・M・Lセット	¥17,600		¥20,900	
マザー・バー 丸型	¥7,150	¥1,100	¥8,250	¥2,200
※マザー・バーセットに丸型は含まれません				希望小売価格(税込)

・記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承下さい。
・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
・本製品は、目的以外の使用は絶対にしないで下さい。

株式会社松本義肢製作所
しあわせをかたちにする人と技術の会社です

・本社
・名古屋営業所
・静岡営業所
・長野営業所

・〒485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
・〒461-0013 名古屋市東区飯田町51
・〒422-8056 静岡市駿河区津島町1番11号
・〒390-0852 松本市大字島立330番1号

・tel. (0568) 47-1701(代) fax (0568) 47-1702
・tel. (052) 939-3577 fax (052) 939-3578
・tel. (054) 288-1115 fax (054) 288-1128
・tel. (0263) 48-2061 fax (0263) 48-2062

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp

やわらかく包み込んで身体を支えます

ポムちゃん
かゆいところに、手がとどきます



楽座フィット

車いす用フィッティングクッション

硬い芯材は使用していません!

擦り擦り傷の原因ともなる硬い芯材は使用していません。
身体を押さえつけることなく、
やわらかいクッションで支え快適に座れます。

楽座フィット・背クッション



背クッションとサポートベルトのセットです。
厚さ調整可能な柔らかいクッションで隙間を埋め、側方から支えをつくり姿勢を安定させます。

楽座フィット・座クッション



臀部や大腿部がすっぽりと収まる立体形状で、身体とクッションの接触面積を増やすことで姿勢を安定させます。
底面に内蔵された合板が芯となりクッション自体の形の崩れを防ぎます。



※車いす取り付けイメージ

TAIS コード：01172-000008

※上記 TAIS コードは「楽座フィット・背座クッションセット」です。

・記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承下さい。
・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
・本製品は、目的以外の使用は絶対に行わないで下さい。

楽座フィット・背クッション

希望小売価格：¥15,400 (税込)

楽座フィット・座クッション

希望小売価格：¥17,600 (税込)

楽座フィット・背座クッションセット

希望小売価格：¥28,600 (税込)

株式会社松本義肢製作所
しあわせをかたちにする人と技術の会社です

本 社 〒485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
名古屋営業所 〒461-0013 名古屋市東区飯田町51
静岡営業所 〒422-8056 静岡市駿河区津島町1番11
長野営業所 〒390-0852 松本市大字島立330番1号

tel. (0568) 47-1701 (代)
tel. (052) 939-3577
tel. (054) 288-1115
tel. (0263) 48-2061

fax (0568) 47-1702
fax (052) 939-3578
fax (054) 288-1128
fax (0263) 48-2062

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp

姿勢を安定させつつ自走や移乗もスムーズに!

コンパクトな背クッションで身体を包み、
車いすに取り付けたベルトでしっかり支えます。
自走時の腕の動きや移乗動作を防げません。

体幹サポートベルトによって
横倒れを防ぎます。



取り付けたまま折りたためます!

背クッションを取り付けたままでも
パッと折りたたため手間になりません。




車いすに乗らない時は
すっきり収納できます。


※座面のクッションは外してください。

～ 使用例 ～

正面から見ると身体の中心線が曲がっている。
ずり落ちてしまい仙骨座りになっている。

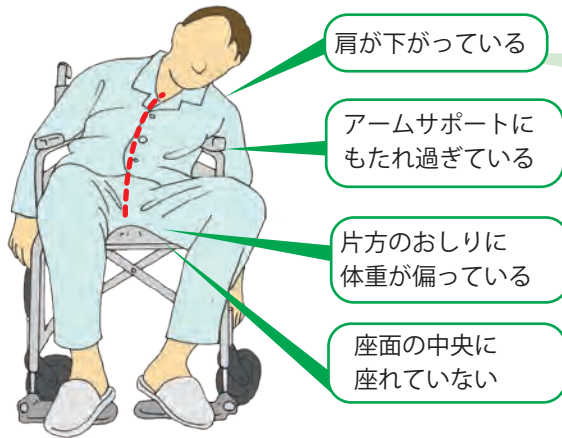


座面に楽座フィット 座クッションに使用。

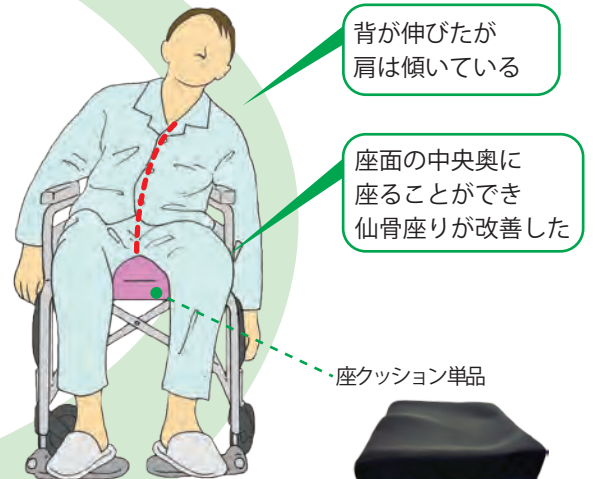

座クッション単品

希望小売価格
¥17,600 (税込)

楽座フィット 背クッションを追加

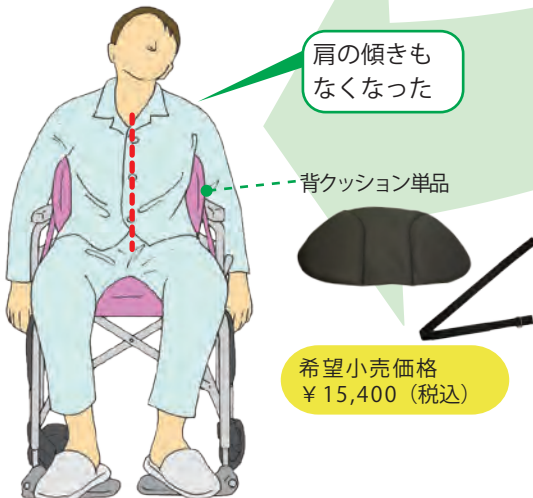

希望小売価格
¥15,400 (税込)

崩れた姿勢でいると・・・

- ・身体の緊張状態が続き、リラックスできない。
- ・腕や足の動きが悪くなり、関節が拘縮してしまう。
- ・内臓が圧迫され、食欲減退や呼吸のしにくさに繋がる。

様々な障害につながります。



良い姿勢で健康的に過ごしましょう。

着脱式・頭部姿勢制御装置

らく tec-keeper[®]
らくテック・キーパー

車いすなどに簡単に取り付けられ快適な頭部姿勢ポジションを保ち頭をやさしくサポートします。



※車いすに取り付けた例
椅子の種類により背板に
適合しにくい場合は
内側にタオルや
スポンジなどを挟み込むことで
ゆるみが無くなります



姿勢保持

- ・車椅子、オフィスや家庭用の椅子など必要に応じて簡単に着脱できます。
- ・ヘッドレストの前後位置調節、角度調節、高さ調節機能により快適なポジションを保てます。

自立支援

- ・背もたれが高い車いすと同等の役割を果たし、円背の方や体幹の筋力が低下した方の姿勢保持に役立ちます。
- ・学校健診、在宅訪問歯科診療、施設などでの治療時の頭部固定に役立ちます。

希望小売価格：¥48,400 (税別)

TAIS コード：01172-000001

- ・記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承下さい。
- ・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
- ・本製品は、目的以外の使用は絶対にしないで下さい。



ヘッドレストの支持棒を前後反対に
付替える事により前方への移動範囲が延び
円背の方にも頭部固定ができます

株式会社松本義肢製作所

しあわせをかたちにする人と技術の会社です

本 社 千485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
名古屋営業所 千461-0013 名古屋市東区飯田町51
静岡営業所 千422-8056 静岡市駿河区津島町1番11号
長野営業所 千390-0852 松本市大字島立330番1号

tel. (0568) 47-1701 (代)
tel. (052) 939-3577
tel. (054) 288-1115
tel. (0263) 48-2061

fax (0568) 47-1702
fax (052) 939-3578
fax (054) 288-1128
fax (0263) 48-2062

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp

☂ 雨の日ももう大丈夫！



レインカバー

通気穴つき

雨のあたりにくい
サイド部分に
通気穴があります

アレルギー対策になります！

透明で視界を妨げません！

風よけにも使えます！



かんたん取付け

本体をかぶせた後で
マジックをとめるだけ

適応サイズ一覧

	SS	S	M	L	LL
RV-pocket II		小	大	大	特大
WRB		小	大	大	
RV-pocket II e		大	大	特大	特大
REST wagon		大	大	特大	

希望小売価格 各サイズ ¥6,050 (税込)

材質:PVC(塩化ビニル)

・記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承下さい。
・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
・本製品は、目的以外の使用は絶対にして下さい。

サイズ
小・大・特大

バギー
専用

このレインカバーを取り付けるには、(株)きさく工房社製 RV-pocket II e・RV-pocket II・RESTwagon
又はWRBのオプション"日よけ"が必要になります。

気温が高い日のご使用は、内部の温度・湿度が上がり易い為、熱中症に十分ご注意ください。

株式会社松本義肢製作所
しあわせをかたちにする人と技術の会社です

- ・本社
- ・名古屋営業所
- ・静岡営業所
- ・長野営業所
- ・〒485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
- ・〒461-0013 名古屋市東区飯田町51
- ・〒422-8056 静岡市駿河区津島町1番11号
- ・〒390-0852 松本市大字島立330番1号

- ・tel. (0568) 47-1701(代) fax (0568) 47-1702
- ・tel. (052) 939-3577 fax (052) 939-3578
- ・tel. (054) 288-1115 fax (054) 288-1128
- ・tel. (0263) 48-2061 fax (0263) 48-2062

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp

レインかっぱ 取扱い説明書

正しくお使いいただく為に、ご使用前に必ずこの取扱説明書とご使用のバギーの取扱説明書をよくお読みの上、お使い下さい。
また、本書は大切に保管して下さい。本製品を他のお客様にお譲りになる時は、必ず本書もあわせてお渡し下さい。

使用目的

この製品は、バギーに取付け、降雨時にお子様を雨に濡れないようにする為のものです。

必要部品



本製品をご使用するには、「日よけ」が必要となります。

取り付け方法

●日よけを完全に広げバギーに正しく取り付けます。

●レインカバーを日よけの上からかぶせます。

●後ろの部分にてマジックで止めて下さい。

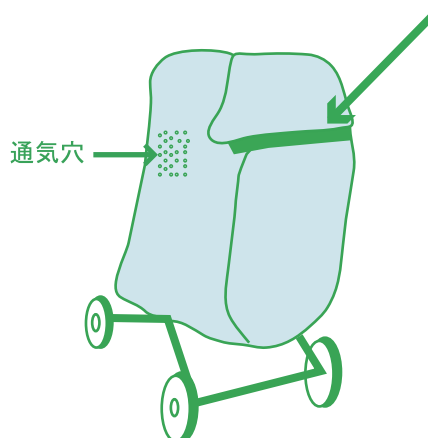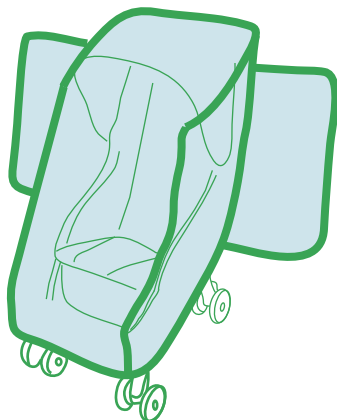

警告

- 天候によりレインカバー内の温度が上昇するおそれがございますので、必ず気温上昇などに気をつけて下さい。
- 炎天下でのご使用は、絶対におやめ下さい。
- 風の強い時は、バギーが動き出したり、転倒するおそれがありますのでご注意ください。
- レインカバーがお子様の口や鼻をおおい、窒息するおそれがあります。必ず日よけを開いてからお使い下さい。
- レインカバーを使つての遊びなど使用目的以外のご使用は、絶対にしないで下さい。
- 保護者の方は、必ずお子様のもとを離れずに、レインカバー内の温度、風の強さ、鼻や口をおおっていないかなど気をくばって下さい。
- 火に近づけないで下さい。火事やヤケドの原因になります。

注意

- 本製品の取り付け、取り外しは必ず保護者の方が行って下さい。
- マジック部分に髪の毛などがはさみ込まれないようにご注意ください。思わぬケガをするおそれがあります。

ご使用温度が高くなるとレインカバーの内側がくもることがあります。
レインカバーのつなぎ部分より雨水が浸入することがあります。
材質の特性上レインカバーのキズやしわが目立つことがあります。

レインカバー ●材質：PVC（塩化ビニル）

こぶグリップ

手のすべりを防ぎ
スムーズな駆動が
可能になります。

こぶ
拡大

希望小売価格 17,600円(税込)

TAISコード：01172-000005

- ・ハンドリムを握ることが難しい方（頸髄損傷・リウマチ）
- ・握れるけど握力の弱い方

【セット内容】

こぶグリップ本体(左右各1本)

素材:合成ゴム

重量:約400g/本

固定用ベルト(8本)

素材:ナイロン、鉄(メッキ加工)

重量:約5g/本



被せる
だけ!
簡単着脱



PAT No.5936389

・記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承下さい。
・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
・本製品は、目的以外の使用は絶対にしないで下さい。

株式会社松本義肢製作所

しあわせをかたちにする人と技術の会社です

・本社
・名古屋営業所
・静岡営業所
・長野営業所

・〒485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
・〒461-0013 名古屋市東区飯田町51
・〒422-8056 静岡市駿河区津島町1番11号
・〒390-0852 松本市大字島立330番1号

・tel. (0568) 47-1701(代) fax (0568) 47-1702
・tel. (052) 939-3577 fax (052) 939-3578
・tel. (054) 288-1115 fax (054) 288-1128
・tel. (0263) 48-2061 fax (0263) 48-2062

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp

脚こぎ車いす

東海地区限定

考える matsumoto

tec series



デモ

片麻痺患者様へこの1台 出かけよう！

レンタル
For Rent!
デモ機の
お貸し出しも可能です！

- ・脚をけり出すだけで簡単前進。行動範囲が広がります。
- ・セーフティ（安全）ハンドルにて前輪を動かし方向を変えます。
- ・麻痺側は動かしません。
- ・折りたたみが可能！車のトランクに収納できます。
- ・麻痺していない脚をより動かす事で、心肺機能や脚力の向上を促進する事も期待できます。



セーフティ（安全）ハンドルで簡単操作

簡単けり出しペダル

一般的な車いすの場合 健側のみでの操作になるため
まっすぐに進む事や非麻痺側への
方向転換等が難しい等の課題が残ります
当社「脚こぎ車いす」では 思い通りの方向へ進む事が出来
下肢の筋力の低下や関節拘縮が生じにくくなります

・記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承下さい。
・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
・本製品は、目的以外の使用は絶対にしないで下さい。

介護保険適用 (月額レンタル料金 12,500円 (非課税))
TAISコード：01172-000004 (ご利用者様負担額 1,250円 (非課税)) 希望小売価格 380,000円 (非課税)

お問合せ先 ☎ 052-939-3577

！デモ機のお貸し出しが可能です！お気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

FAX：(052) 939-3578
〒461-0013 名古屋市東区飯田町51
【営業時間】午前10時～午後7時まで
【休業日】日曜日・祝祭日

healthy life for you

♥ ハートフル / ショップ / エイト

「こころづかい」ハートウェアショップ

製造：株式会社松本義肢製作所

開発：(旧) 労災リハビリテーション工学センター



riefoot 2.0

リーフット
ストラップバンド
短下肢装具

尖足矯正
足関節背屈
の改善

安定歩行
転倒予防



装具を装着しても靴を選びません。

- ・背屈・外反の両方向の制動力を保持しながら、薄型・軽量で装着感にすぐれます。
- ・足の甲の部分を調節できる靴であれば容易に装着することができます。
- ・装着したままでのしゃがみ動作も可能です。
- ・踵部分が露出しているため、歩行接地時のフィードバックが得られやすく利用者が本来持っている歩行能力を引き出せます。

適応対象者：軽度の片麻痺、腓骨神経麻痺など下垂足の方

サイズ	小	大
足長	21.5 ~ 24.0cm	24.0 ~ 27.0cm

※サイズは目安にして頂き、フィッティングを重視して下さい。

- ・記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承下さい。
- ・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
- ・本製品は、目的以外の使用は絶対にしないで下さい。

※靴との装着例

～仕様～

本体：PE：ポリエチレン
本体ストラップバンド：人工皮革・面ファスナー

装具重量：小：約80g / 大：約90g（左右別有）

希望小売価格：お問合せ下さい

株式会社松本義肢製作所
しあわせをかたちにする人と技術の会社です

本社 名古屋営業所 静岡営業所 長野営業所
〒485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
〒461-0013 名古屋市東区飯田町51
〒422-8056 静岡市駿河区津島町1番11号
〒390-0852 松本市大字島立330番1号

tel. (0568) 47-1701(代) fax (0568) 47-1702
tel. (052) 939-3577 fax (052) 939-3578
tel. (054) 288-1115 fax (054) 288-1128
tel. (0263) 48-2061 fax (0263) 48-2062

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp



Hip & Ankle Linked Orthosis

対麻痺用新歩行装具 / Gait Orthosis For Paraplegic Patients



下肢が
完全に麻痺した人の為の
新しい
歩行用装具です

- 足関節部製作例
(セット内容)
- ・HALO 継手
 - ・ワイヤー
 - ・ワイヤーカバー
 - ・足関節部品
 - ・本体取り付け金具
 - ・その他ねじ類


・記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承下さい。
・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
・本製品は、目的以外の使用は絶対にしないで下さい。

(動作原理)

足首と股関節が連動して動き、足を踏み出しても常に足底が床に平行になり、安定した歩行ができます。

歩行速度は従来の装具の1.5倍から2倍、エネルギー効率も優れています。

片方の足関節に背屈力が加わるとかかとに付いているワイヤー①が引っ張られ、その力は股継ぎ手に伝えられ②プーリーが回転する。このプーリーとつながっている③反対側の下肢が振り出されます。

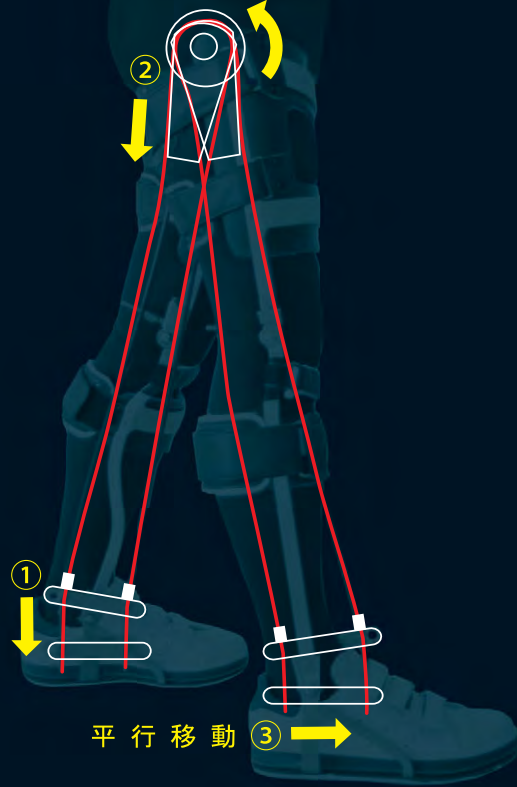

この装具は、医師又は義肢装具士にご相談下さい。

株式会社松本義肢製作所
しあわせをかたちにする人と技術の会社です

・本社
・名古屋営業所
・静岡営業所
・長野営業所

・〒485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
・〒461-0013 名古屋市東区飯田町51
・〒422-8056 静岡市駿河区津島町1番11号
・〒390-0851 松本市大字島内4621-1

・tel. (0568) 47-1701(代) fax (0568) 47-1702
・tel. (052) 939-3577 fax (052) 939-3578
・tel. (054) 288-1115 fax (054) 288-1128
・tel. (0263) 48-2061 fax (0263) 48-2062

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp

転倒スペースをなくします！

開発協力：長野中央病院リハビリテーション科 中野友貴先生

スーパー楽々手すり α アルファ



立つ・座る
移乗動作を
サポート

麻痺などによりバランスをとりにくい方の移乗動作をサポートし、ベッドサイドでの転倒を予防します。
ポータブルトイレや車いすへの移乗訓練を安全に行う手助けにもなります。

TAIS コード：01172-000009

希望小売価格：¥61,600(税込)
右降り用・左降り用

オプション：
スーパークッション

new
新商品

らくらくスペーサー

寄りかかってバランスを
保つことができます。



希望小売価格：¥25,300(税込)



転倒スペースをなくしつつ
立ち上がり時の膝折れを防止します。

※使用例は裏面参照

特別価格：¥12,100(税込)

対応ベッド

- フランスベッド ○パラマウントベッド ○プラッツ
- ランダルコーポレーション など 【JIS改定後に製造されたベッド】

株式会社松本義肢製作所

しあわせをかたちにする人と技術の会社です

本社 〒485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
名古屋営業所 〒461-0013 名古屋市東区飯田町51
静岡営業所 〒422-8056 静岡市駿河区津島町1番11号
長野営業所 〒390-0852 松本市大字島立330番1号

tel. (0568) 47-1701(代)
tel. (052) 939-3577
tel. (054) 288-1115
tel. (0263) 48-2061

fax (0568) 47-1702
fax (052) 939-3578
fax (054) 288-1128
fax (0263) 48-2062

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp

～ 使用例 ベッドからポータブルトイレへの移乗 ～

①ベッドからの立ち上がり



手すりを掴んで立ち上がります
支えにもなり前方への転倒リスクを減らせます

②方向転換



手すりが側方からの支えとなり
ベッド反対側への転倒リスクを減らします

③ポータブルトイレへ座る



手すりが掴み易い位置にあるため
座る時にも支えとなります

～ オプション使用例 ～ 広い面で身体を支えます

「らくらくスペーサー」に寄りかかることができ、立位が不安定な方の安全な移乗が可能です



スーパー楽々手すりaは、転倒に繋がるスペースを埋め
「転びたくても転べない空間」を作ります。

デモ機
貸出します。



特許出願済

pushboard

簡易型大腿四頭筋訓練器 プッシュボード

大腿四頭筋を鍛える為の運動器具です



ボードをおさえ込むだけの簡単な運動です

いつでもどこでも 筋力UP!
健康寿命をのばそう!

大腿四頭筋力の強化は膝に安定性を与え
変形性膝関節症の過剰な負荷から生じる痛みを
軽減させるのに非常に有効となります。
この筋肉は年齢に伴って衰え易くなり
かんたんにできる継続的なトレーニングが
もっとも効果的です。

6mm
リハビリ用に!

8mm
ココモ予防に!

本体寸法
W 110 × L 650 × H 170 mm
適応身長
145 ~ 175 cm
※数値はあくまで目安です

希望小売価格 9,900円(税込)



オプション 簡易型筋力測定ベルト
希望小売価格: ¥9,900 (税込)

・記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承下さい。
・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
・本製品は、目的以外の使用は絶対にしないで下さい。

株式会社松本義肢製作所
しあわせをかたちにする人と技術の会社です

本社 485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
名古屋営業所 461-0013 名古屋市東区飯田町5-1
静岡営業所 422-8056 静岡市駿河区津島町1番11
長野営業所 390-0852 松本市大字島立330番1号

tel. (0568) 47-1701(代) fax (0568) 47-1702
tel. (052) 939-3577 fax (052) 939-3578
tel. (054) 288-1115 fax (054) 288-1128
tel. (0263) 48-2061 fax (0263) 48-2062

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp



“歩く”よろこびをもう一度 ウェイトサポート・トレッドミル

吊り上げ式免荷重訓練装置

～新しいリハビリテーション～

従来のリハビリテーション方法では不可能だった四肢麻痺により
上肢で体を支えられない方や体重が重く介助歩行が困難な方の
リハビリテーションも可能となります。

～約5～10倍の長時間運動が可能～

従来リハビリテーションに比べ、約5～10倍の長時間繰り返し
歩行運動を可能にします。歩行パターンの構築（CPGの賦活*）を
促進するのみでなく、筋力および、筋疲労耐性の向上、
心肺機能の向上にもつながります。


*歩行、呼吸、咀嚼運動などのリズム的なパターン運動を惹起する神経回路網

～早期からの課題試行的歩行が可能～

吊り上げにより、体重を免荷しなければ下肢が振り出せない人も
歩行動作が可能になります。また、具体的な数値目標を設定した
歩行訓練が早期から可能になります。

～下肢動作に集中～

自らバランスを保つ必要が無く、下肢動作に集中できます。
転倒などの心理的な恐怖感を抑え、理学療法士が常時監視している
必要もありません。

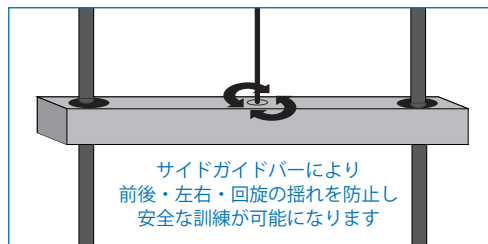

吊り上げ式免荷重訓練装置 (手動ウィンチによる巻き上げ式)

～仕様～

吊り上げ最大荷重：150kg

吊り上げ位置の調整：手動ウィンチによる巻き上げ

免荷重の表示：0～200kg デジタル表示

本体材料：アルミ引き抜き材

外形寸法：H240 X W120 X D160cm（オーダーメイド製作可）

重量（概算）：88kg（トレッドミルは含まず）

- ・記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承下さい。
- ・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
- ・本製品は、目的以外の使用は絶対にしないで下さい。

※トレッドミルは市販のリハビリ用トレッドミルを使用します。

希望小売価格：お問合せ下さい

株式会社 **松本義肢製作所**
しあわせをかたちにする人と技術の会社です

- ・本社
- ・名古屋営業所
- ・静岡営業所
- ・長野営業所
- ・〒485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
- ・〒461-0013 名古屋市東区飯田町51
- ・〒422-8056 静岡市駿河区津島町1番11号
- ・〒390-0851 松本市大字島内4621-1

- ・tel. (0568) 47-1701(代) fax (0568) 47-1702
- ・tel. (052) 939-3577 fax (052) 939-3578
- ・tel. (054) 288-1115 fax (054) 288-1128
- ・tel. (0263) 48-2061 fax (0263) 48-2062


info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp

褥瘡予防に

多目的ウレタン

ふわふわフォーム[®]

自由に切って
使える素材

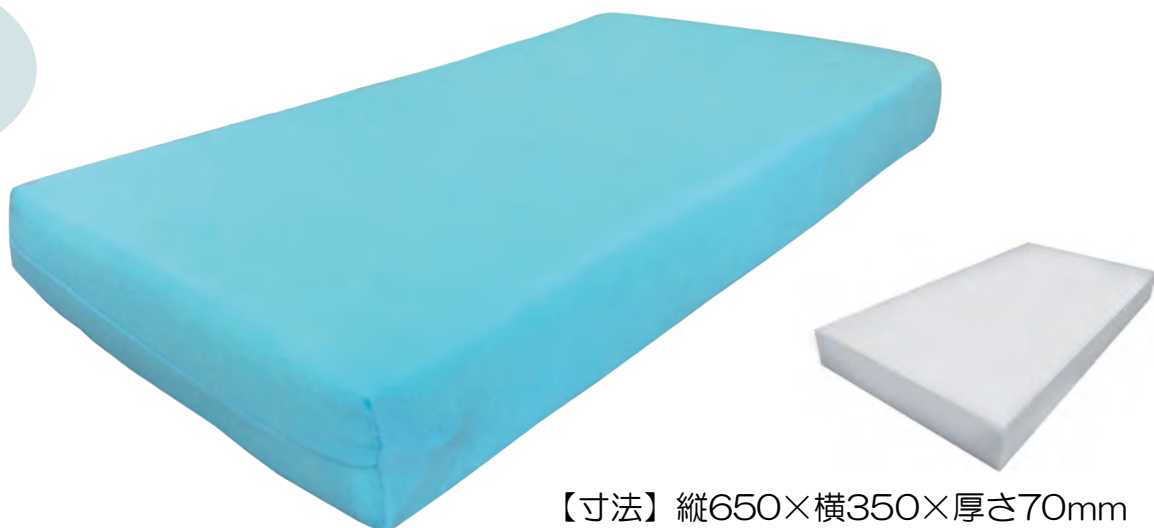

【寸法】縦650×横350×厚さ70mm

骨突出や拘縮のある方・・・

キズのできやすい方・・・

除圧・体圧分散に効果的です

■ 選べる2種類の軟らかさ ■

やわらかい

レギュラータイプ

カバーセット

希望小売価格：¥2,200(税込) / 枚

より
やわらかい

ソフトタイプ


カバーセット

希望小売価格：¥2,530(税込) / 枚

使用例



上肢

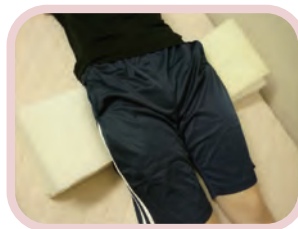

仙骨部



下肢

記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承下さい。
製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
本製品は、目的以外の使用は絶対にしないで下さい。

※クッションのみ、カバーのみの単品購入も可能です。

株式会社 **松本義肢製作所**
しあわせをかたちにする人と技術の会社です

本 社
名古屋営業所
静岡営業所
長野営業所

〒485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
〒461-0013 名古屋市東区飯田町51
〒422-8056 静岡市駿河区津島町1番11号
〒390-0852 松本市大字島立330番1号

tel. (0568) 47-1701(代)
tel. (052) 939-3577
tel. (054) 288-1115
tel. (0263) 48-2061

fax (0568) 47-1702
fax (052) 939-3578
fax (054) 288-1128
fax (0263) 48-2062

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp

傷がしやすい足をやさしく守る靴下

用途にあわせて豊富な種類を取り揃えています。



あなたの足を守るために
ドイツ生まれの足をいたわるソックス

ゴムを使用せず そっと優しく包み込む履き心地
※一部製品を除きます

特殊製法による仕上げで段差なし！！



一般的なソックス



クラシック



しめつけの苦手な方に・・・

[特殊製法]



ショパールノリスフラン ハーフクッション



足部を切断された方に・・・

エクストラワイド



かなりむくみの強い方に・・・

イーソックスシリーズは他にも種類がございますので、カタログをご希望される方は弊社までご連絡ください。

four leaf clover 足病変や切断を防いで足を守る



就寝時にも最適・・・
蓄熱繊維と通気編み



冷房や寒さ対策に・・・
遠赤パイルと二層編み



運動用にも・・・
吸湿パイルと速乾繊維

裏側は白の**二重構造**で
傷などによる出血を素早く発見できます。
*「暖」「爽」のみ



記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承下さい。
製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
本製品は、目的以外の使用は絶対にしないで下さい。

希望小売価格：お問合せ下さい

Limb walker[®]

考える matsumoto

ら < tec series



膝免荷補装具
リム・ウォーカー

PAT.No.6487136

歩行
リハビリ
運動

廃用症候群
防止

下肢救済



90度に曲げた膝部で体重保持。

創傷部位の筋腱を使わずに歩行訓練が出来ます。

足部に傷などがあり、

免荷が必要な方の廃用症候群防止に効果的です。

【装着ガイド】



① 後方パットを上をスライドします。



② 支持部前方から脚を差込みます。



③ 後方パットを下をスライドさせて膝窩部を押さえます。



④ ベルトで固定して完了です。

～仕様～

・左右別有

・フリーサイズ(サイズ調整用パッド付)

・重量約2kg

・記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承下さい。
・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
・本製品は、目的以外の使用は絶対にしないで下さい。

希望小売価格：¥275,000(税込)

株式会社松本義肢製作所

しあわせをかたちに作る人と技術の会社です

本社 485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
名古屋営業所 461-0013 名古屋市東区飯田町51
静岡営業所 422-8056 静岡市駿河区津島町1番11号
長野営業所 390-0852 松本市大字島立330番1号

tel. (0568) 47-1701(代)
tel. (052) 939-3577
tel. (054) 288-1115
tel. (0263) 48-2061

fax (0568) 47-1702
fax (052) 939-3578
fax (054) 288-1128
fax (0263) 48-2062

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp