## ~持続的夜間矯正装具~

# Night ADM c-producect



対象疾患

先天性内反足、先天性多発性関節拘縮症 脳性麻痺などによる内反尖足変形・内反尖足痙縮

特徵

- ・デニスブラウンバーを必要としない短下肢装具デザイン
- スプリングによる持続的矯正効果が得られます
- ・2 軸機構の動きにより生理的関節軸に追随します
- ・サンダル部分と支柱部分はワンタッチで着脱可能
- ・装着も簡単です

足長(サンダルサイズ)

8~20cm ※別途オーダーフォーム参照

カラー

グレー

※スニーカー取り付けタイプの「Day ADM」も取り扱っております



#### 2軸機構

支柱には2つの軸が設定されています。

生理軸の動きが再現され、効果的に矯正が可能です。

TTJ(tibio-talar joint): 距腿関節STJ(sub-talar joint): 距骨下関節



### スプリングによる持続的矯正効果

軸にはスプリングが装填されています。

低負荷で持続的な強制力により、長時間のストレッチ効果が得られます。スプリングはソフト/スタンダード/ストロングの3種類から選択できます。

途中変更はできないため、スプリングを変更したい場合は、、別途支柱をご注文ください。



#### 装着の簡便さ

サンダル部分と支柱部分はワンタッチで着脱できます。 先にサンダル部分を装着してから支柱をはめ込むだけなので 簡単に装着できます。



### デニスブラウンバータイプ

両足を連結したデニスブラウンバータイプにワンタッチで組み換えが可能です。

外転角度は30°/45°/60°/70°から選択できます。 バーの長さは工具を使用せず変更可能です。

使用できるバーの長さはサンダルサイズによって異なります。 ※別途オーダーフォーム参照

デニスブラウンバータイプは足長7cmからご使用いただけます。









サンプル貸出・ご購入窓口: tel. (0568) 47-0150

企画事業部

mail: kikaku@pomgs.co.jp

〒485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3

tel. (052) 386-1523 fax (052) 386-1 email: kajaaj@pomas.co.jp

**T**461-0013 名古屋市東区飯田町51番地

しあわせをかたちにする人と技術の会社 松本義肢製作所 Q

