

らくたんぽだっこ[®]

軽量 携帯型ナイロンメッシュ担架

1人介助

非常・緊急時の担架としても活躍しています



・折りたたんで携帯、収納にも便利です

・ナイロン素材で手入れがとても簡単

・入浴時の介護など水に濡れる場面にも清潔にお使いいただけます



・クロスベルトにより1人での介護時に安心した移動作業が可能です



2
サイズ

M

65cm x 46cm (適応身長 ~ 110cm)

L

75cm x 80cm (適応身長 110 ~ 170cm)

【体重】100kg まで (各サイズとも) 【素材】ナイロンメッシュ

・記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承ください。
・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
・本製品は、目的以外の使用は絶対にしていただきません。

株式会社松本義肢製作所
しあわせをかたちにする人と技術の会社です

本社
名古屋営業所
静岡営業所
長野営業所
開発センター

〒485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
〒461-0013 名古屋市東区飯田町5-1
〒422-8056 静岡市駿河区津島町1番11号
〒390-0851 松本市大字島立330番1号
〒485-0804 愛知県小牧市大字池之内蓮池409番1号

tel. (0568) 47-1701(代)
tel. (052) 939-3577
tel. (054) 288-1115
tel. (0263) 48-2061
tel. (0568) 47-1701(代)

fax (0568) 47-1702
fax (052) 939-3578
fax (054) 288-1128
fax (0263) 48-2062
fax (0568) 47-1702

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp

らくちんだっこ

ご利用ガイド



- 1** 介助者側から見てまずこの状態にします
補強テープのある面を裏になるようにします。



- 2** 要介助者を横向きに乗せタスキをクロスさせ
バックルにつけます。



- 3** クロスさせた所から介助者の頭をくぐらせます
両腕をタスキのように通します。



- 4** 要介助者との距離が開きすぎないように
タスキを調節します。



- 5** タスキの先端のマジックテープをとめます。



- 6** 手前の取っ手に腕を通し、奥の取っ手をつかみ
要介助者の安定を確認してゆっくり持ち上げます。



- 7** 腕の力だけでなく、体全体で安定に支えるので
一人でも安心介助が可能です。

肩への
負担を
軽減します

オプション肩パッド

- ・内側は3Dメッシュ素材を使用
- ・抗菌仕様で水に濡れても大丈夫



2個セット(黒色) ¥1,760(税込)

希望小売価格: ¥12,760(税込)

オーダーカラー(赤色・黄色・黒色)は¥3,300(税込)増しになります。

オーダーカラー ● 赤 ● 黄 ● 黒