



Hip & Ankle Linked Orthosis.®

対麻痺用新歩行装具 / Gait Orthosis For Paraplegic Patients




下肢が
完全に麻痺した人の為の
新しい
歩行用装具です

(動作原理)

足首と股関節が連動して動き、足を踏み出しても常に足底が床に平行になり、安定した歩行ができます。

歩行速度は従来の装具の1.5倍から2倍、エネルギー効率も優れています。

片方の足関節に背屈力が加わるとかかとに付いているワイヤー(①)が引っ張られ、その力は股継ぎ手に伝えられ(②)プーリーが回転する。このプーリーとつながっている(③)反対側の下肢が振り出されます。

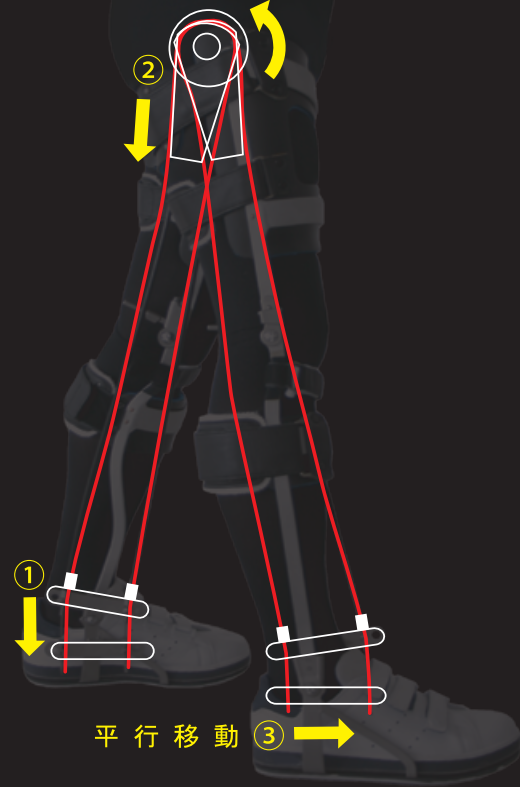

・記載製品は、印刷のため、色等に若干の違いが生じる場合がありますのでご了承下さい。
・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
・本製品は、目的以外の使用は絶対にしないで下さい。

この装具は、医師・理学療法士又は義肢装具士にご相談下さい

株式会社松本義肢製作所
しあわせをかたちにする人と技術の会社です

本 社
名古屋営業所
静岡営業所
長野営業所

〒485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
〒461-0013 名古屋市東区飯田町51
〒422-8056 静岡県駿河区津島町1番11
〒390-0851 松本市大字島内4621-1

tel. (0568) 47-1701(代)
tel. (052) 939-3577
tel. (054) 288-1115
tel. (0263) 48-2061

fax (0568) 47-1702
fax (052) 939-3578
fax (054) 288-1128
fax (0263) 48-2062

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp