

## アクボバスチェア ユーザーマニュアル



User manual



株式会社松本義肢製作所

しあわせをかたちにする人と技術の会社です



## 【目次】

- 1.ユーザーマニュアルの目的
- 2.使用の目安
- 3.アクボバスチェアの構成要素
- 4.サイズ展開
- 5.シートの貼り方
- 6.調整方法
- 7.製品の使用にあたり
- 8.安全にご使用頂くために
- 9.メンテナンス

アクボバスチェアはお子様の身体を洗うのにとっても使用しやすい製品です。外出先への持ち出しもしやすく簡単に設置がおこなえます。腰、膝部分に傾斜角度の調整機能を備えておりお子様にとって快適にご使用頂けるようニーズに合わせた調整がおこなえます。

アクボバスチェアは水透過性メッシュのシート張りのため入浴中の使用に最適です。ヘッドレスト、胸ベルト、骨盤ベルト、レッグベルトを装備しているため安心してご使用頂けます。お子様にとっての入浴や日常生活をおこなう上で安定した快適な体位に適応することができます。シートの張り調整がおこなえます。

アクボバスチェアはアルミフレームなので耐久性があり水の影響を受けにくい仕様となっています。バスタブや浴室の床を保護するためのフォームカバーが装備されています。



### 注意！

ユーザーマニュアルをよくお読み頂き内容を理解した上で製品をご使用ください。  
ユーザーマニュアルの内容に必ず従いご使用ください。

### 1.ユーザーマニュアルの目的

このマニュアルには、製品の正しい使用方法、使用前のご準備、お手入れについて、保証条件が記載されています。マニュアルは破棄せずいつでも確認できる場所に保管してください。

このマニュアルは、お子様を直接ケアするご両親、医師、理学療法士、義肢装具士を対象としています。



注意！

製品を使用する前に、ユーザーマニュアルに記載してある内容を理解する義務があります。

### 2.使用の目安

脳性麻痺：その段階に依存しています。片麻痺、片側筋力低下、筋痙縮または弛緩性麻痺を呈するお子様にご使用頂けます。

対麻痺：歩行が非常に困難であるお子様にご使用頂けます。歩行可能または松葉杖を使用するお子様にもご使用頂けます。

片麻痺：伸展位と限られた運動に関連しています。主に上肢の麻痺があり体幹と頭部の筋力が弱いお子様にご使用頂けます。

四肢麻痺：頭部、体幹、四肢の麻痺があるお子様にご使用頂けます。

### 3.アクボバスチェアの構成要素

- ①本体フレーム
- ②ヘッドレスト
- ③胸ベルト
- ④骨盤ベルト
- ⑤シート
- ⑥レッグベルト



#### 4. サイズ展開




Symbol	Measurement	Unit	Size 0	Size 1	Size 2
A	Seat width	[cm]	37	42	45
B	Seat depth	[cm]	23-28	28-33	32-40
C	Head rest height	[cm]	16	16	19
C1	Back rest height	[cm]	31	40	44
C2	Lower leg length	[cm]	26	31	36
C3	Floor to seat distance	[cm]	11-44	11-44	13-49
	User weight (max)	[kg]	25	30	40

Weight and dimensions of the device		Size 0	Size 1	Size 2
Product width	[cm]	42	42	45
After folding width	[cm]	42	42	45
Product length	[cm]	70	75	91
After folding length	[cm]	64	67	76
Product height	[cm]	80	85	96
After folding height	[cm]	28	28	29
Product weight	[kg]	4	4	4,5

## 5.シートの貼り方

### 構成要素

- 1.本体フレーム
- 2.フットレストフレーム
- 3.バックレストフレーム
- 4.角度調整機構
- 5.骨盤ベルト
- 6.ヘッドレスト
- 7.シート

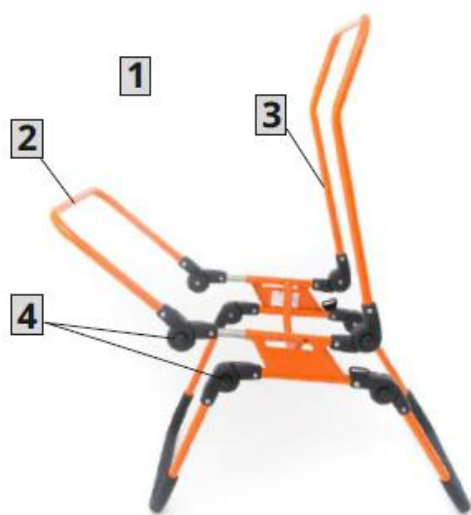

### 【本体フレームにシートを取り付ける】

角度調整機構（G・F）をそれぞれ調整し、バックレストとフットレストの間の角度を曲げます（fig.1）。

角度調整機構ボタンは両サイド同時に押しながら操作ができます。

シートの上部をバックレストフレームに差し込みます（fig.2,3）。

シート下部をフットレストフレームに差し込みます（fig.4）。

シートのすべてのストラップを本体フレームの下側を通してマジックテープで留めます（fig.5,6）。

角度調整機構をそれぞれ調整し使用できる角度に戻します。（fig.7,8）







**【骨盤ベルトを取り付ける】**

AとBはfig.9に示す「カン」を通します。

カンにベルトを差し込み固定します (fig.10-12)。

Eを本体フレームの下からバックルでCとDに接続します (fig.13)。



**【ヘッドレストを取り付ける】**

頭部が安定する位置を確認してから取り付けをおこないます。

ヘッドレストの両端を本体フレームの後ろに回しベルクロで確実に固定します (fig.14,15)。



## 6.調整方法

アクボバスチェアは角度調整機構を使用することで以下の調整がおこなえます。

### 【バックレスト】



### 【フットレスト】



### 【ティルト角度】



アクボバスチェアはヘッドレスト、胸ベルト、骨盤ベルト、レッグベルトを装備しています。製品を使用している間これらの部品はお子様を保護します。以下の手順に従って製品を使用してください。

ヘッドレストのベルトはマジックテープで本体フレームに固定する必要があります。ヘッドレストのパッドは間隔の調整が可能です。



胸ベルト固定します。シートのループを通してベルトの高さを調整してください。胸ベルトがずれないようにするために必ずループを通してください。



レッグベルトを固定します。シートのループを通してベルトの高さを調整してください。レッグベルトがずれないようにするために必ずループを通してください。



骨盤ベルトを固定します。適切な安定性と安全性を提供します。ベルトの根元はカンを通っていること、バックル付き下部ストラップはシートの下から通して固定してあることが重要です。



### 【座奥行調整機構】

座奥行を調整するためには、両側のボタンを押して調整する必要があります。ベルト等の応力で簡単に押されることがないようにボタンは硬めの設定になっています。ピンポンチ等の先端のある工具などで押して調整を行ってください。



### 【シート張り調整】

シートの張り調整は本体フレーム後ろに通してあるベルトで簡単に調節ができます。

## 7. 製品の使用にあたり

製品を使用する前に、以下の手順に従ってください。

- ・ 本体を広げます。
- ・ 傾斜のない平らな場所でのみご使用頂けます。本体を置いて安定しているか必ずご確認ください。
- ・ すべての部品が問題なく正しく取り付けられており各部分が安定していることを確認してください。
- ・ シートとヘッドレストをお子様に合わせて調整してください。
- ・ お子様を座らせたのちベルト一式をとめてください。

使用者の身長と体重に応じて製品が調整されている場合にのみ本製品は正しく機能します。製品を購入する際には、これらの測定値をすべて考慮に入れることを忘れないでください。成長段階における安全性を考慮して正しい調整をおこなうことが重要なことです。使用者を同じポジションに座らせた状態で放置しないでください。



### 注意！

製品を使用する前に、すべてのベルトとロックが正しく調整され固定されていることを確認してください。

※坐骨の落ち込みが強い場合には、座シートの重なり部分(フレーム調整に対応するためのシート長調整マジックテープ)をシート長が一番短くなるように調整していただくと座面の下がりが多少軽減します。



## 8.安全にご使用頂くために



### 注意！

製品はユーザーマニュアルの記載内容を必ず厳守しご使用ください。

製品の選択とサイズに関しては、医師または理学療法士、義肢装具士にご相談ください。  
装置を使用する前に、ユーザーマニュアルに記載されている内容を必ず正しく理解してください。

1.製品を使用する前に、以下の内容を確認してください。

適切な使用がされていない状況での使用者や周囲への怪我やトラブル、製品の損害についてメーカー、代理店、販売店は一切責任を負いません。

- ・使用者にとって危険となる可能性がある損害または違和感がないことを確認してください。すべての部品が正しく作動し、正しく取り付けられていることを確認してください。また、ひび割れや変形がないことを確認してください。
- ・ボルト、ナット、その他の部分、接着部分、縫製部分がすべて問題ないことを確認してください。
- ・バックルが正しく作動していることを確認してください。
- ・使用中は常にベルトを使用してください。これらのベルトのベルクロは、最小で8cm重なり合う必要があります。
- ・使用者のニーズに合わせて製品各部を調整してください。
- ・ヘッドレスト、胸ベルト、骨盤ベルト、レッグベルトを使用してください。製品からの落下に対して使用者を保護するために必要です。

2.製品を本来の目的とは異なる目的に使用することは禁止されています。

3.製品が破損や不足部分・部品がある場合は、製品を使用することは禁じられています。

4.使用者を製品に乗せたまま放置することは禁止されています。

5.製品を熟知した人または医療スタッフなしで製品を使用することは禁止されています。

6.製品本体を損傷から回避するため、輸送中は製品を折りたたんで固定してください。不適切な方法の輸送により生じた損害についてメーカー、代理店、販売店は一切責任を負いません。

7.製品およびシートは火炎拡散材料で構成されていますが、製品を火の近くや高温の近くに置くことは禁止されています。



### 注意！

製品には、お子様が飲み込む可能性がある小さな部品が含まれています。

非常に危険であるため製品にいかなる改造・変更を加えることは禁じられています。許可なく加えられた改造・変更がある場合、製品の保証はなくなります。

許容重量を超えることは禁じられています。耐荷重については「4.サイズ展開」の項をご参照ください。

製品はユーザーマニュアルの記載内容を必ず厳守しご使用ください。

## 9.メンテナンス

アクボバステアはメーカーの推奨事項に従い清潔に保ち使用する必要があります。清潔で乾燥した換気のよい部屋に保管してください。メンテナンスと清掃は少なくとも月に1回は行わなければなりません。安全性と正しい機能を維持するためには定期的な清掃とメンテナンスをおこなってください。

次のガイドラインに従ってください。

- ・シートを本体フレームから取り外し、洗濯機を使用することが可能です。最高温度は60度です。
- ・溶剤や苛性薬品によるシートのお手入れは禁止されています。
- ・塩素性薬品を使用しないでください。
- ・アイロンは使用しないでください。
- ・火や高温から最低3mは離して乾かしてください。



注意！

間違った洗剤の使用によって生じた損害についてメーカー、代理店、販売店は一切責任を負いません。

メーカー、代理店は、ユーザーマニュアルの耐用を遵守したにもかかわらず生じた潜在的な欠陥または損害についてのみ責任を持っています。

何らかの損害が発生した場合は、販売店に連絡する必要があります。



# REH4MAT

36-060 Głogów Małopolski, ul. Piaski 47, POLAND

Factory of Orthopaedic Devices:  
ul.Truskawkowa 17, Widna Góra, Jarosław, POLAND  
tel. 16 621 42 20, 16 621 41 35  
fax 16 621 41 13  
[www.reh4mat.com](http://www.reh4mat.com) | [www.ortezy.pl](http://www.ortezy.pl)  
e-mail: [biuro@reh4mat.com](mailto:biuro@reh4mat.com)

REH4MAT reserve the right to introduce technical and trading changes  
in the content of the instruction without warning.

**AM-K2/U/1/EN**