


【X-tension の取り付け工程】

X-tension は背屈制動を目的に短下肢装具への取り付けが可能です。


1.X-tension は短下肢装具の後面に取り付けます。

2. SNAPstop が SNAPstop ウィンドウのから見えるようにセットします。(SNAPstop を使用しない場合は、SNAPstop ウィンドウ下縁レベルを足継手軸中心に合わせます)。

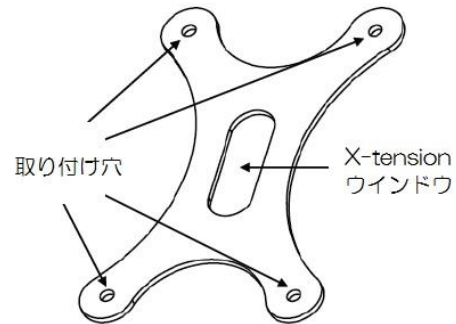

3.プラスチックに下部取り付け穴の位置をマークします。

4.マークの位置に 3.2mm (もしくは 1/8 インチ) のドリルビットを使用して穴を開けます。

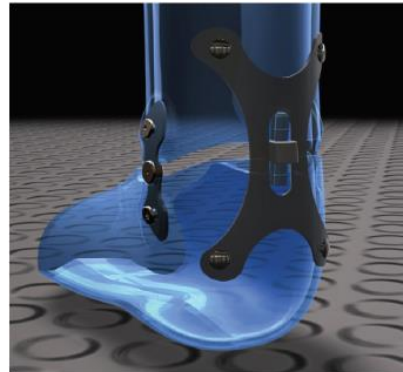

5. X-tension の下部 2 点をプラスチックに固定します。

ダイナミックであればカシメで固定します。

スタティックであれば銅鍍リベットで固定します。

6.上部 2 点の取り付け穴に印を付けます。マークの位置に 3.2mm(もしくは 1/8 インチ) のドリルビットを使用して穴を開けます。同様にプラスチックに固定します。

(X-tension の張力を上げるには、マークから少し上に穴を開けます。)