

Kneemo.®

knee movement organizer

ニーモ



ゴムチューブを動力源として、膝関節の屈曲、もしくは伸展をサポートする補助付きの膝装具です。
装着することで、身体能力を使い、運動能力を向上させ、早期離床や歩行の自立を目的としてリハビリもサポートします。
動力源のゴムチューブは、セラピストが使用者の身体能力に合わせて最適な強さを選んで取付けます。
チューブは取付けフックに掛けるだけで着脱が簡単です。

株式会社 松本義肢製作所
しあわせをかたちにする人と技術の会社です

本社 〒485-8555 愛知県小牧市大字林210番地の3
名古屋営業所 〒461-0013 名古屋市東区飯田町51
静岡営業所 〒422-8056 静岡市駿河区津島町1番11号
長野営業所 〒390-0851 松本市大字島立330番1号
開発センター 〒485-0804 愛知県小牧市大字池之内蓮池409番1号

tel. (0568) 47-1701(代) fax (0568) 47-1702
tel. (052) 939-3577 fax (052) 939-3578
tel. (054) 288-1115 fax (054) 288-1128
tel. (0263) 48-2061 fax (0263) 48-2062
tel. (0568) 47-1701(代) fax (0568) 47-1702

info@pomgs.co.jp
http://www.pomgs.co.jp

kneemo 特徴

ゴムチューブを動力源とした膝関節の屈曲、もしくは伸展をサポートする補助付きの膝装具です。セラピストが使用者の身体能力に合わせて最適なチューブの強さを選択します。最適に使用することで、身体能力を使い、運動能力を向上させ、早期離床や歩行の自立を目的としてリハビリもサポートします。



屈曲サポート

- フットクリアランスの増加
- イニシャルコンタクト～ミッドスタンスにおける膝関節伸展運動の防止
- イニシャルスイングにおける下肢の振出しを促す



伸展サポート

- イニシャルコンタクトにおける膝関節屈曲の軽減
- ミッドスタンスにおける膝折れの軽減
- 長下肢装具から短下肢装具への移行時に短下肢装具と併用




屈曲・伸展サポート

- 膝関節の支持性にプラスして安定性の向上
- 自立歩行可能な方において、歩行速度、距離の増加
- 長下肢装具から短下肢装具への移行時に短下肢装具と併用（伸展サポートのみより振出しやすい）

● 医師または医療従事者の方で本製品サンプルデモをご希望される方はお問合せください ●

サポーター本体（繊維）	ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、合成ゴム
サポーター本体（繊維以外）	人工皮革、ポリプロピレン、ポリエステル、ナイロン、黄銅、アルミニウム、強化ナイロン
チューブ	天然ゴム、エポキシ系樹脂
Knee/バンド	ナイロン、ポリエステル

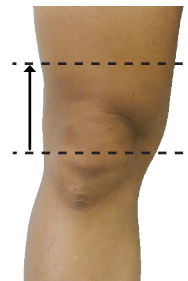

サイズ	適応範囲
S	34cm～38cm
M	38cm～42cm
L	42cm～46cm
LL	46cm～50cm

※膝蓋骨中心より10cm上の大腿周径囲

セット内容

kneemo 本体、チューブ2組、Knee バンド1型

※詳細は松本義肢製作所までお問い合わせください。



←動画はこちらから

- ・製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- ・本製品は目的以外の使用は絶対にしないでください。
- ・本製品は医療機器ではなく、効果効能を保证するものではありません。